



## TER08 - TERMOMETRO DIGITALE

Approvazione CE 0123 della normativa 93/42

**Classe:** 2°A

**Tipo:** digitale, latex free.

### Caratteristiche

Elevata precisione. Senza mercurio.

Facile utilizzo e alta resistenza agli urti.

Campo di misurazione: da 32,0°C a 42,0°C.

Accuratezza di misurazione:  $\pm 0,1^\circ\text{C}$ .

Display: a cristalli liquidi con 3,5 posizioni.

Batteria: da 1,5 V.

Durata della batteria: circa 100 ore, se usato in continuazione. Spegnimento automatico del termometro se non viene utilizzato.

Allarme: acustico, segnala il raggiungimento della temperatura finale.

Memoria: visualizzazione dell'ultima temperatura rilevata.

Condizioni d'impiego: temperatura ambiente tra 10°C e 42°C.

Peso: 11 grammi circa batteria inclusa.

Marchiatura: CE 0123 stampata sul termometro e sul contrastuccio singolo di cartone.



**Destinazione d'uso:** misurazione della temperatura corporea.

### Sistema di funzionamento / utilizzo

Accendere il termometro premendo il pulsante di accensione. Sul visore appare per due secondi: 188.8°E accompagnato da un "beep" sonoro. Al rilascio del tasto appare per due secondi l'ultima misurazione effettuata e successivamente il display mostra il simbolo "L°C". Il simbolo "L" e una "°C" lampeggiante indicano l'inizio della misurazione. Per misurare la temperatura per via rettale o orale il termometro impiega solo 60 secondi circa, mentre per via ascellare impiega 100 secondi circa; alla fine della misurazione "°C" smette di lampeggiare e un segnale acustico della durata di 5 secondi avvisa dell'avvenuta rilevazione. Viene memorizzata l'ultima misurazione.



## Manutenzione e pulizia

Prima e dopo ogni utilizzo pulire sempre accuratamente la punta del sensore usando un batuffolo di cotone leggermente imbevuto di una soluzione d'acqua saponata contenente il 70% di alcool isopropilico. Non utilizzare acqua calda!

Per la disinfezione utilizzare i seguenti disinfettanti:

<u>Disinfettante</u>	<u>Concentrazione</u>	<u>Metodo</u>
Etanolo	70-80%	Pulire la punta del sensore con un panno inumidito di disinfettante
Alcool isopropilico	70-90%	

## Conservazione e manipolazione del dispositivo

Conservare a temperatura ambiente, senza esporre ad umidità o calore diretto. Forti campi elettromagnetici potrebbero alterare il corretto funzionamento.

Dopo l'uso il termometro resta acceso per 10 minuti: si consiglia lo spegnimento manuale per risparmiare l'energia della pila.

**Precauzioni di utilizzo:** si consiglia di tenere il termometro lontano dalla portata dei bambini poiché le batterie, nel caso ingerite, risultano tossiche. Il termometro non risulta dannoso a contatto con l'organismo poiché privo di mercurio. Il modello TER08 non è impermeabile e a contatto con l'acqua potrebbe quindi disattivarsi.

**Controindicazioni e iterazioni:** non ci sono particolari controindicazioni o iterazioni nell'utilizzo di questo dispositivo medico.

**Dimensioni:** 133 mm x 22 mm x 13 mm (con astuccio trasparente)

**Modalità di trasporto e smaltimento:** non ci sono particolari osservanze cui attenersi nel trasporto; le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori per la raccolta differenziata.

## Confezione e imballo

Fornito di istruzioni in lingua italiana, astuccio di plastica trasparente e contrastuccio singolo di cartone per vendita al pubblico.